

NEY VACUUM PUMPE ESM 7H Art.-Nr. 0949-28-72

INBETRIEBNAHME:

- Entfernen Sie die beiden Gummistopfen (Öl-Auslaufschutz). Diese unbedingt für weitere Transporte aufbewahren.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit Ihrem Keramikbrennofen.
- Schliessen Sie den Schlauch an den Vacuum-Stutzen (dickeren Anschluß) an.
- **Den anderen dicken Stutzen geschlossen lassen!!**
- Beachten Sie die Betriebsdauer der Pumpe um den erforderlichen Ölwechsel durchzuführen.


ÖLWECHSEL:

Bei regelmässigem Betrieb sollte alle 6 Monate ein Ölwechsel erfolgen

Bitte verwenden Sie dazu immer das NEY Original Vacuumumpenöl (Pumpenöl 370 ml, Art.-Nr. 0949-09-15)!

Vorgehensweise

- Vacuumpumpe auf die linke Seite neigen und das Öl durch die Vacuum-Anschluss- Öffnung (links) ablassen

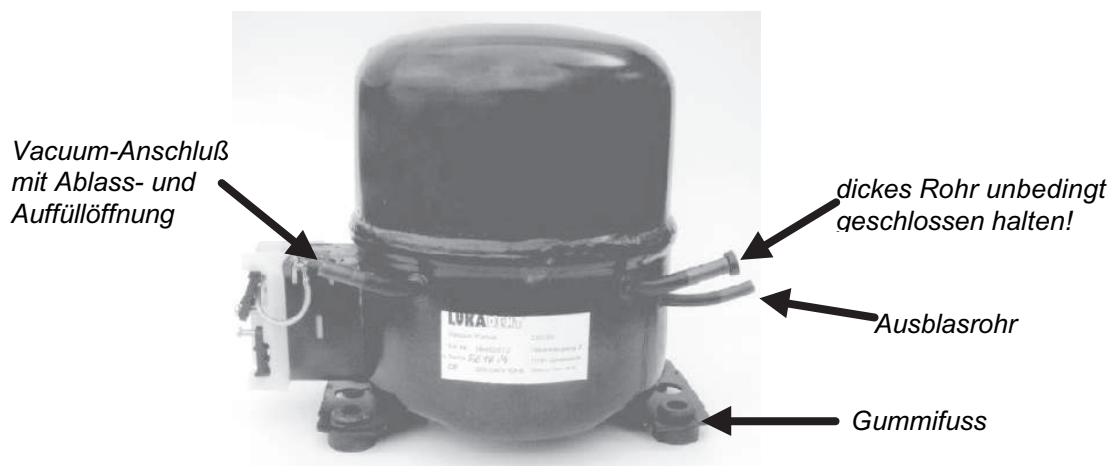

Nachdem das Öl abgelaufen ist (z. B. über Nacht), die Vacuumpumpe wieder aufrecht stellen.

Vacuumpumpe mit ca. 350 ml Öl wieder auffüllen. Nach dem Auffüllen das Öl ca. 2 Stunden setzen lassen.

VERSAND/TRANSPORT

- **IMMER GUMMIFÜSSE ENTFERNEN! sonst BRUCHGEFAHR!**
- Für den Transport der Vacuumpumpe immer die Verschlussstopfen in die Ein- und Abfüllröhre setzen, sonst ÖLAUSLAUFGEFAHR. Ausgelaufenes Öl führt zur Zerstörung der Vacuumpumpe und bedeutet „Umweltverschmutzung“.