


Vision
■ ZIRKON

BRENNTABELLE
FIRING CHART

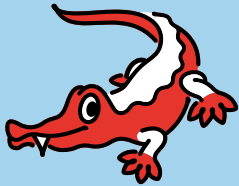

WOHLWEND AG

Wohlwend AG
Dental Manufaktur

Platta 52
FL-9488 Schellenberg
Phone: +423-373-4243
Fax: +423-373-4244
www.wohlwend-ag.com
info@wohlwend-ag.com

Zirkon Brenntabelle

Richtwerte!

Abweichungen sind wegen unterschiedlicher Ofenleistung möglich.

Zircon firing chart

Recommended firing parameters.

Temperatures can vary due to different furnace performances.

	Starttemperatur Start temperature	Trocknen Dry time	Anstieg Heat rate	Endtemperatur Final temperature	Halten Hold	Vakuum Vacuum
Liner	450°C 842°F	4 min.	55°C/min. 131°F/min.	800°C 1472°F	1 min.	ja yes
Schulter Shoulder	450°C 842°F	4 min.	45°C/min. 113°F/min.	830°C 1526°F	1 min.	ja yes
Dentin 1 Dentine 1	450°C 842°F	6 min.	45°C/min. 113°F/min.	810°C 1490°F	1 min.	ja yes
Dentin 2 Dentine 2	450°C 842°F	6 min.	45°C/min. 113°F/min.	800°C 1472°F	1 min.	ja yes
Glanzbrand mit Glasur Glazing with glaze	480°C 896°F	2 min.	45°C/min. 113°F/min.	800°C 1472°F	1 min.	–

Press Liner	450°C 842°F	2 min.	55°C/min. 131°F/min.	900°C 1652°F	1 min.	ja yes
Malfarbe Staining	450°C 842°F	4 min.	45°C/min. 113°F/min.	810°C 1490°F	1 min.	–
Glasur Glazing	450°C 842°F	4 min.	45°C/min. 113°F/min.	800°C 1472°F	1 min.	–