

Isolant

Beschreibung

Isoliermittel für Acrylharze

Anwendungszweck

Schnell trocknender, Hochleistungstrennlack, entwickelt zur Isolierung von Gips gegen Harz

Vorteile

- Leichte Trennung des Acryls nach der Polymerisation
- Verunreinigt weder das Harz noch die Farbe
- Hohe Stabilität ohne Ablagerungen

Anwendung

1. Applizieren Sie die Lösung gleichmäßig, mit einem Pinsel, auf das nasse Modell
2. Trocknen lassen
3. Falls erforderlich, zweite Schicht auftragen

Haltbarkeit

Die Haltbarkeit des Produkts beträgt 2 Jahre bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen. (Hinweis: Das Verfallsdatum gilt für das Produkt in seiner Originalverpackung bevor es geöffnet wurde)

Lagerung

Bewahren Sie das Produkt stets fest verschlossen in seiner Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort auf.

Verpackung

Flasche, 1000 ml



Felsenbergweg 2
D-71701 Schwieberdingen
+49(0)7150-32955
sales@lukadent.de

Isolant

Description

Separating fluid for acrylic resins

Use

Separating varnish with a fast drying and high performance for the isolation between gypsum vs resin

Advantages

- Easy separation of the acrylic after polymerisation (self or heat curing)
- It doesn't contaminate the resin neither the colour
- Great stability without sedimentation

Application

1. Apply the product uniformly with a brush to the wet model
2. Let it dry
3. Apply a second layer, if necessary

Shelf life

The shelf life of the product is 2 years respecting the storage conditions. (Note: The expiry date is considered with the product in its original packing and before being opened).

Storage

Keep the product tightly closed in its original packaging in a dry and cool place.

Packing

Bottle, 1000 ml



Felsenbergweg 2
D-71701 Schwieberdingen
+49(0)7150-32955
sales@lukadent.de