




LUKADENT®

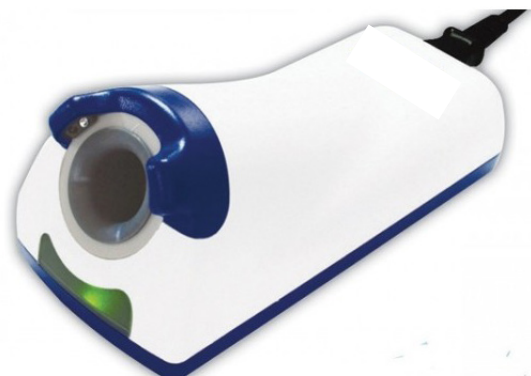

nofire **Induktionsheizgerät für** **Wachsmesser**

Produktbeschreibung

Das LUKADENT Induktionsheizgerät dient der Erwärmung von Wachsmessern auf sichere und bequeme Art und Weise. Statt das Wachsmesser durch offenes Feuer wie mit Bunsenbrennern, Alkoholampfen oder Gasbrennern zu erhitzen.

- Super schnelle Erhitzung des Wachsmessers auf hohe Temperaturen
- Sicherer als Geräte mit offenem Feuer wie z.B. Bunsenbrenner
- Hohe ökologische Effizienz durch den Aktivierungssensor
- Ergonomisch gestaltet für bequeme Handhabung
- Hoher Hygienestandard durch austauschbare Hygienekappen
- Warnung durch Fehlercode, wenn das Wachsmesser zu lange aufgeheizt wird.

Bedienungsanleitung

- 1) Stecken Sie das Netzkabel ein
- 2) Betätigen Sie den Netzschalter
- 3) Stecken Sie das Wachsmesser in den Aufheizbereich
- 4) Ihr Wachsmesser wird jetzt erhitzt. Die Kontrollleuchte wechselt während des Heizvorgangs von grün auf rot.

Spannung	230 V
Leistung	130 W
Abmessungen	92 x 270 x 95 mm
Gewicht	550 gr
REF	3819100

