

Isolant

Beschreibung

Isoliermittel für Acrylharze/Kunststoffe

Abpackung

Flasche, 1000 ml

Verwendung

Schnell trocknender, Hochleistungstrennlack, entwickelt zur Isolierung von Gips gegen Harz

Haltbarkeit und Lagerung

Die Haltbarkeit des Produkts beträgt 2 Jahre bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen. (Hinweis: Das Verfallsdatum gilt für das Produkt in seiner Originalverpackung bevor es geöffnet wurde).

Bewahren Sie das Produkt stets fest verschlossen in seiner Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort auf.

Vorteile

- Leichte Trennung des Acryls nach der Polymerisation
- Verunreinigt weder den Kunststoff noch die Farbe
- Hohe Stabilität ohne Ablagerungen

Anwendung für den Gebrauch

1. Applizieren Sie die Lösung gleichmäßig, mit einem Pinsel, auf das nasse Modell
2. Trocknen lassen, mindestens 10 min
3. Falls erforderlich, zweite Schicht auftragen



Lukadent GmbH
Felsenbergweg 2
71701 Schwieberdingen
sales@lukadent.de

Isolant

Discription

Separating fluid for acrylic resins/ plastics

Packaging

Bottle, 1000 ml

Uses

Separating varnish with a fast drying and high performance for the isolation between gypsum vs resin.

Storage an expiry

The shelf life of the product is 2 years respecting the storage conditions. (Note: The expiry date is considered with the product in its original packing and before being opened).

Keep the product tightly closed in its original packag.

Advantages

- Easy separation of the acrylic after polymerisation (self or heat curing)
- It doesn't contaminate the resin/plastics neither the colour
- Great stability without sedimentation

Working instructions

1. Apply the product uniformly with a brush to the wet model
2. Let it dry for min. 10 minutes
3. Apply a second layer, if necessary



Lukadent GmbH
Felsenbergweg 2
71701 Schwieberdingen
sales@lukadent.de