


LUKADENT[®]

**Anleitung
instruction for use**

Pinbohrgerät
LUKADrill **mps**



Lukadent GmbH
Felsenbergweg 2
D-71701 Schwieberdingen
+49 (0) 7150 - 32955
info@Lukadent.de
www.Lukadent.de

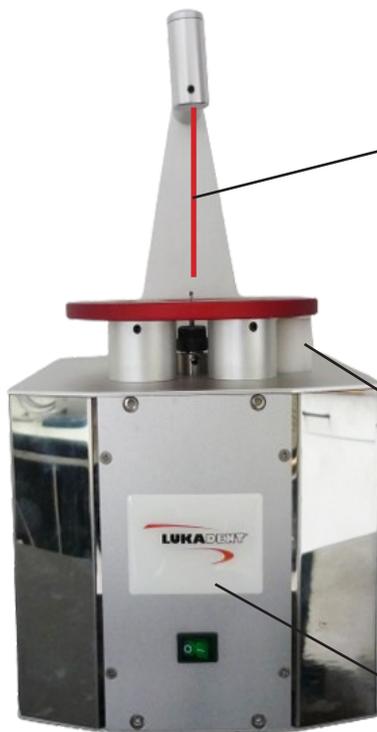

Laserstrahl (3A < 5 mW)
laser (3A < 5 mW)


Druckknopf - Schalter zum Auslösen
des Bohrvorganges.
Pushbutton - switch to trigger the drill-
ing process.

Ein- / Ausschalter
on / off switch



Anschluss 230 V
conect 230 V

Bohrerwechsel / exchange drills

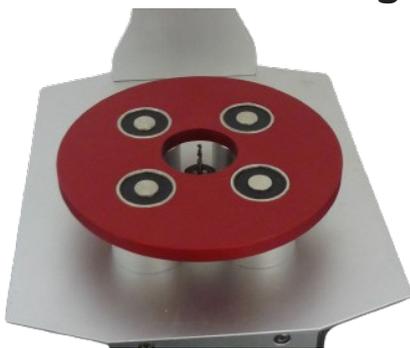

Netzstecker ziehen. Haltestift seitlich in ein Loch der Bohrachse stecken. Mit Rohrsteckschlüssel das Bohrfutter entgegen dem Uhrzeigersinn öffnen. Bohrer tauschen oder Bohrtiefe einstellen.

Unplug the power cable. Insert the fixing pin from the side into one of the holes of the drilling axis. Turn the tubular socket wrench in counter-clockwise direction to unscrew the sleeve. Exchange drills or adjust depth.

Technische Daten / Technical Data

Gewicht / Weight	13,5 Kg
Anschluss / Power connection	230 V
Laser Klasse / Laser class	3A < 5 mW

Mitgeliefertes Zubehör / Delivery volume

Plattenaufnahme / Base plate clamb
Abdruckträger / Modell carrier
Werkzeug zum Bohrerwechsel / Tool for changing drill bits