

LUKA DENT[®]

**Anleitung
instruction for use**

Pinbohrgerät
LUKADrill pm



Lukadent GmbH
Felsenbergweg 2
D-71701 Schwieberdingen
+49 (0) 7150 - 32955
info@Lukadent.de
www.Lukadent.de



Laserstrahl (3A < 5 mW)



Anschluss 230 V
conect 230 V

Mit dem Lasersuchstrahl die gewünschte Bohrposition anvisieren. Um den Bohrvorgang auszulösen, das Gipsmodell zusammen mit dem Modelltisch mit beiden Händen nach unten drücken.

Use the laser beam to aim at the desired drilling position. To initiate the drilling process, press the plaster model together with the model table with both hands down.

Ein- / Ausschalter
on / off switch

Bohrerwechsel / exchange drills

Netzstecker ziehen. Haltestift seitlich in ein Loch der Bohrachse stecken. Mit Rohrsteckschlüssel das Bohrfutter entgegen dem Uhrzeigersinn öffnen. Bohrer tauschen oder Bohrtiefe einstellen.

Unplug the power cable. Insert the fixing pin from the side into one of the holes of the drilling axis. Turn the tubular socket wrench in counter-clockwise direction to unscrew the sleeve. Exchange drills or adjust depth.

Technische Daten/Technical Data

Gewicht / Weight	13,5 Kg
Anschluss / Power connection	230 V
Laser Klasse / Laser class	3A < 5 mW

Mitgeliefertes Zubehör /Delivery volume

Werkzeug zum Bohrerwechsel / Tool for changing drill bits